

## Conseils essentiels pour voyager sans problème avec un implant cochléaire

- Avant le départ
- A l'aéroport
- Ce qu'il faut prendre en compte lors du voyage

### Avant le départ

Voyager nécessite une planification minutieuse, particulièrement pour les personnes porteuses d'un implant cochléaire. Vous trouverez ici les éléments à prendre en compte avant de partir en vacances.

#### Emballage des accessoires du processeur audio

- Rangez votre équipement de processeur audio et ses accessoires dans votre bagage à main de manière à ce qu'ils soient sécurisés et accessibles. Il s'agit notamment de batteries de rechange, de câbles de rechange et d'un emballage sec et sécurisé pour ranger votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Veillez à emporter suffisamment de piles ! Que vous utilisiez des piles jetables ou rechargeables, prévoyez d'emporter suffisamment de piles jusqu'à votre retour à la maison, ou votre chargeur si vous utilisez des piles rechargeables.  
Si vous voyagez à l'étranger, n'oubliez pas d'emporter les bons convertisseurs de puissance.
- Emportez un kit de séchage et des couvercles microphones de rechange pour assurer le bon fonctionnement de votre processeur.
- Si vous prévoyez de nager, de passer du temps à la plage ou de pratiquer d'autres activités aquatiques, n'oubliez pas d'emporter le [WaterWear](#) (des housses de protection contre l'eau). N'oubliez pas non plus les piles LR44 (alcalines) à utiliser avec le WaterWear ou utilisez des piles rechargeables.
- Assurez-vous d'avoir non seulement les coordonnées de votre représentant MED-EL local, mais aussi celles d'un représentant sur votre lieu de vacances en cas d'urgence.  
([Clinic Finder \(medel.com\)](#))
- Enfin, n'oubliez pas d'emporter votre carte d'identité de patient (Patient ID-card) en cas d'urgence.

## A l'aéroport

Ces conseils vous seront utiles si vous voyagez en avion (ou si vous devez passer des contrôles de sécurité ailleurs).



Utiliser la boucle à induction

- Cherchez le [symbole telecoil](#) de la bobine téléphonique. Vous le trouverez parfois dans les aéroports, dans les centres de voyage et aux guichets des hôtels. Ce signe signifie que la pièce est équipée d'une boucle à induction. Cela vous permet d'entendre plus facilement votre conversation ou les annonces de mise à jour sur le voyage. Le processeur doit être en mode T ou MT - Voir le manuel.

Informez le personnel de l'aéroport de votre implant cochléaire

- Lorsque vous vous enregistrez à l'aéroport, indiquez au personnel que vous avez un implant auditif afin qu'il puisse inclure éventuellement cette information dans votre profil de voyageur si nécessaire.
- Veillez à avoir votre carte d'identité de patient (Patient ID-card) à portée de main.

Détecteurs de métaux et rayons X

- Vous pouvez passer le détecteur de métaux avec votre processeur audio. Veillez simplement à informer le personnel de sécurité que vous avez un implant cochléaire, car cela pourrait déclencher le détecteur.
- Ne placez pas vos processeurs audio directement sur le tapis roulant ou dans les bacs en plastique si vos bagages doivent être enregistrés. Cela peut générer de l'électricité statique. Éteignez-les et prenez-les en informant le personnel de sécurité que vous les avez avec vous, ou mettez-les dans un sac sûr et sans électricité statique, tel qu'un sac en tissu.

Prendre l'avion avec un implant cochléaire

- Si vous voyagez seul, informez l'hôtesse de l'air que vous êtes malentendant. En cas d'urgence, ils sauront que vous risquez de ne pas tout entendre via les haut-parleurs.
- Pour savoir si votre processeur audio doit être mis en mode avion, vérifiez la politique de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Toutefois, cela n'est souvent pas nécessaire.  
Activation du mode avion pour SONNET 2 et RONDO 3 : voir dernière page.

## Ce qu'il faut prendre en compte lors du voyage

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux profiter de votre destination de vacances.

Informez le personnel de l'hôtel de votre implant cochléaire

- Lors de votre enregistrement, indiquez à la réception de votre séjour que vous êtes malentendant et comment vous contacter en cas d'urgence. Le personnel de l'hôtel peut vous proposer de vous contacter par SMS, par téléphone ou en personne.

Protégez votre processeur audio

- Si vous avez une carte magnétique pour entrer dans votre chambre d'hôtel, tenez-la éloignée de votre audio processeur : l'aimant de la bobine de votre audio processeur peut démagnétiser la clé.
- Si vous faites de la plongée, n'oubliez pas que les implants sont conçus pour une profondeur maximale de 50 mètres sans audio processeur externe.
- N'oubliez pas de changer les piles ou de recharger vos audio processeurs ainsi que de nettoyer et sécher votre audio processeur régulièrement.

Utilisez des aides à l'écoute

- Recherchez les aides disponibles dans les attractions touristiques, les théâtres et les musées. Ces dispositifs peuvent améliorer votre expérience d'écoute et vous permettre de ne pas manquer des informations ou des contenus audio importants.

Et surtout : amusez-vous ! Grâce à ces conseils, vous serez prêt pour des vacances pleines de nouvelles expériences et de nouveaux sons.

Pour les dernières mises à jour, consultez le site:


<https://blog.medel.com/tips-tricks/essential-tips-for-hassle-free-travel-with-cochlear-implants/>

## SONNET 2

## Activation du mode avion

Activez le mode avion chaque fois que vous montez à bord d'un vol ou entrez dans un environnement où les transmissions par radio fréquences (RF) sont interdites.

- 1 Éteignez l'audio processeur et attendez 2 secondes.
- 2 Mettez l'audio processeur en marche et attendez 2 secondes.
- 3 Répétez de nouveau trois fois les étapes 1 et 2. Un bref clignotement de l'indicateur lumineux rouge confirme une activation réussie.

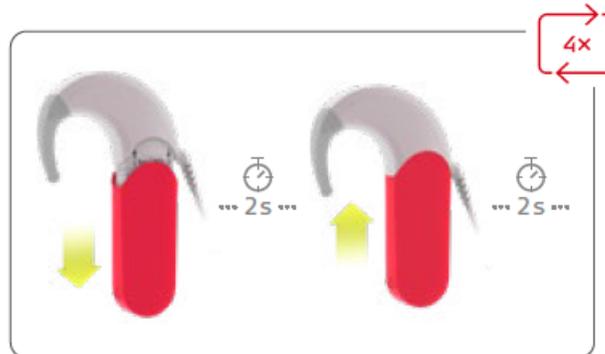

### Désactivation du mode avion

1. Éteignez l'audio processeur et attendez 2 secondes.
2. Mettez l'audio processeur en marche.

## RONDO 3

## Activation du mode avion

Activez le mode avion chaque fois que vous montez à bord d'un vol ou entrez dans un environnement où les transmissions par radio fréquences (RF) sont interdites.

1. Arrêtez l'audio processeur et attendez au moins 2 secondes.
2. Allumez l'audio processeur et attendez jusqu'à ce que l'indicateur lumineux principal clignote en bleu pour la première fois.
3. Répétez les étapes 1 et 2.
4. Répétez de nouveau les étapes 1 et 2.
5. Répétez encore une fois les étapes 1 et 2.
6. L'indicateur principal clignote brièvement en rouge pour confirmer que le mode avion a bien été activé. Si vous ne voyez pas le voyant rouge, répétez les étapes 1 à 5.



### Désactivation du mode avion

1. Éteignez l'audio processeur et attendez 2 secondes.
2. Mettez l'audio processeur en marche.